

FUNZIONI PER L'UTENTE

- 1) **Schienale**
Regolazione dello schienale
- 2) **Posizione della seduta**
Regolazione sincrona dello schienale e dell'alzagambe
- 3) **Regolazione dell'altezza**
Regolazione dell'altezza della struttura del letto

Descrizione del LED




Il sistema è pronto per l'uso, o in modalità di blocco



Tasto di azione premuto: l'azione viene eseguita.

Nessun tasto di azione premuto: Anomalia!

Per 2 sec.: la modalità di blocco è attivata o disattivata

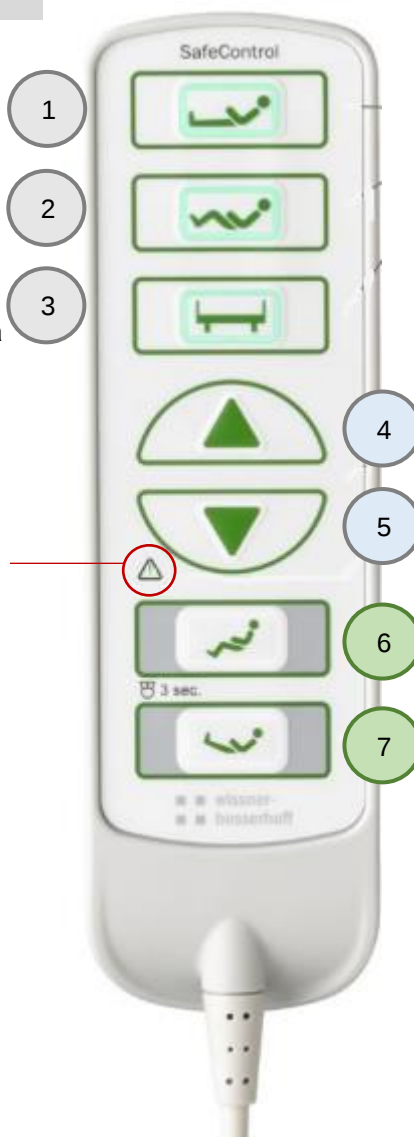

Lampeggiano dopo aver selezionato la funzione


- 4) **SU**
Movimento verso l'alto della funzione selezionata
- 5) **GIÙ**
Movimento verso il basso della funzione selezionata

FUNZIONI PER PERSONALE DI CURA


- 6) **Regolazione automatica della posizione seduta comfort**
Per portare il letto nella posizione seduta preimpostata
- 7) **Regolazione automatica della posizione profilassi**
Favorisce la profilassi antistasi nelle patologie vascolari e quella antidecubito

FUNZIONI SUPPLEMENTARI

Luce d'orientamento notturna

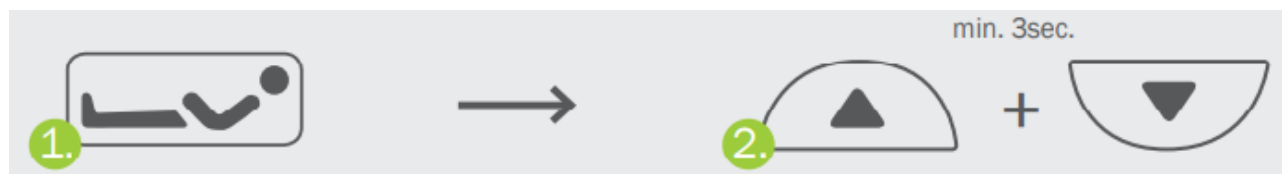

Piega ginocchia

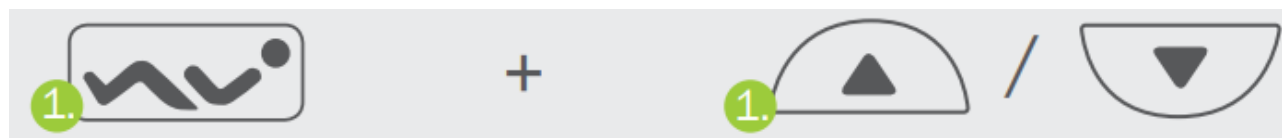

TEMPI DI ATTIVAZIONE

Modalità assistenza




Blocco di tutte le funzioni



PER PERSONALE DI CURA

Posizione di cura

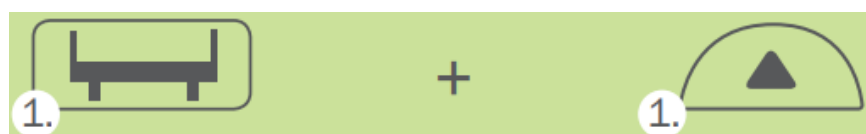

Lampada da lettura

