



wissner-
bosserhoff

estetica nova

Arredi per un ambiente piacevole da vivere



“In sostanza l’uomo ha soltanto due desideri: invecchiare, rimanendo giovane.”

Peter Bamm

La consapevolezza che la nostra aspettativa di vita sia in continua crescita, cambia anche la nostra coscienza verso le generazioni più anziane. Assistiamo ad un cambiamento di valori che ci mette davanti a nuove ed interessanti sfide. Stare al passo con la nuova cultura della terza età, significa migliorare la qualità della vita degli anziani e soprattutto di coloro che non sono autosufficienti.

In questo contesto, wissner-bosserhoff segue un obiettivo ben preciso e cioè esaudire i desideri e le esigenze delle persone non autosufficienti con innovativi e funzionali prodotti. Il letto per lungodegenti estetica nova è particolarmente adatto per questo tipo di obiettivo. Essendo infatti una sintesi tra elevata sicurezza e comfort individuale, estetica nova si confà in modo specifico e consono alle esigenze delle persone non autosufficienti.

estetica nova S 10





01




02

Pagina precedente Letto per lungodegenti estetica nova S10 in acciaio con comodino stylo C3.

01 La pediera S è realizzata in acciaio e legno conferendo al letto un aspetto moderno.

02 Le sponde laterali sollevabili fino a 40 cm sono una protezione individuale ed offrono la massima libertà di movimento.

Pagina a destra comodino stylo C3 in acciaio con tavolino regolabile in altezza.

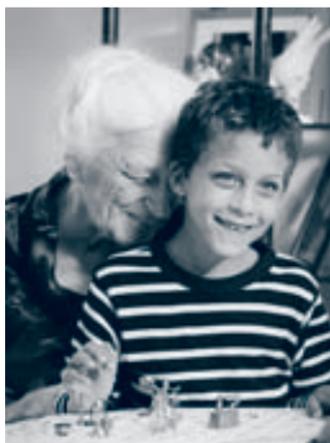

“Ci vuole molto tempo per diventare giovani.”

Pablo Picasso

estetica nova S 10 è l'unione tra abitabilità e comfort individuale di assistenza, anche per i livelli di cura intensiva. Il letto offre numerose e comode funzioni. Oltre alla possibilità di movimento su ogni altezza ed un freno di semplice uso, estetica nova risponde alle norme dello standard degli esperti per la "profilassi anticaduta". Le protezioni laterali divise (zero gap) supportano la mobilità del paziente e chiudono perfettamente tra di loro. Il comodino stylo C3, insignito del premio di design red dot, risponde alle esigenze dei pazienti oltre che offrire un buon comfort individuale.

estetica nova S 10



estetica nova G 09





01

Pagina precedente Letto per lungodegenti estetica nova G09 in noce e comodino vivo E2 con tavolino servitore stylo S3.
01 Sentirsi sicuri con la sponda laterale continua e la soluzione con fermo di bloccaggio.
02 Letto per lungodegenti estetica nova K 09 in noce e comodino E2 con tavolino servitore stylo S3.
Pagina a destra particolarmente economica si rivela la combinazione tra comodino e tavolino servitore, che in caso di non utilizzo può essere riposto risparmiando, così, spazio.



02



Il letto per lungodegenti estetica nova G09 o K09 in noce si inserisce in modo armonico in un ambiente abitativo. Grazie alla doppia retrazione di spalliera e segmento inferiore d'appoggio gambe i pazienti con una statura di 180 cm non necessitano di prolunghe per il piano letto di per sé ingombranti. Il letto realizzato completamente in Germania è provvisto di colonne di sollevamento di produzione propria che garantiscono un carico sicuro di 200 kg. Con il comodino vivo E2 l'intero sistema si presenta in un'ottica più generosa ed unitaria. Praticità: il tavolino servitore può essere semplicemente spinto vicino al letto.

“Nella vecchiaia si comincia a capire.”

Marie von Ebner-Eschenbach

estetica nova G 09



letto di degenza estetica nova

Comfort individuale di assistenza mediante molteplici funzioni.

03 Piano rete

Per una salutare e comoda posizione distesa:

- Doppia retrazione di spalliera (11 cm) e segmento di appoggio gambe (6 cm) per la profilassi antidecubito
- Prolunghe del piano letto
- Parti estraibili per una semplice pulizia
- Scelta facoltativa del materasso
- Ottima areazione del materasso
- Tecnica di ammortizzazione comfort (opzione) per un ulteriore morbido appoggio, zona di orientamento per il supporto nella posizione seduta e per l'orientamento durante il sonno

02 Interruttore manuale

I letti estetica nova si contraddistinguono per la semplice manovrabilità:

- Interruttore manuale ergonomico e semplice
- interruttore manuale e scatola di bloccaggio in un'unica unità
- Dispositivo automatico per la seduta comfort
- Automatismo di profilassi per contrastare le stasi in caso di malattie venose e per la profilassi delle piaghe da decubito secondo Fowler (posizionamento 30° mezzo Fowler)

01 Sponde laterali

L'innovativa concezione di protezione offre notevoli vantaggi:

- Protezione certa "zero gap" senza ulteriori accessori
- Utilizzo come sostegno per muoversi e per alzarsi da letto
- Prevenzione da cadute conforme agli standard degli esperti "Profilassi anticaduta" possibile**
- Regolazione delle protezioni su quattro livelli di altezza
- Utilizzo sicuro di sistemi di fissaggio conformemente al BfArM*



05 Possibilità di frenata e movimento

Tramite il freno centrale tutte e 4 le ruote sono bloccabili con controllo a pedale

- Frenatura e movimentazione indipendenti dalla rete
- Utilizzo che non sollecita la schiena in ogni posizione
- Non è più necessario muovere il letto nella posizione più bassa
- Buona movimentazione grazie alle ruote da 100/125 mm con ruota direzionale

04 Tecnologia di sollevamento

I letti estetica nova si contraddistinguono per una stabile costruzione delle colonne di sollevamento:

- Regolazione dell'altezza da 40 a 82 cm (con ruote da 100 mm)
- Carico di lavoro sicuro di 200 kg
- Accessibilità per tutti i tipi di sollevatori
- Piedi liberi per semplificare le operazioni d'assistenza
- Sistema chiuso e pertanto molto semplice da disinfettare



CE



Sicurezza: La gestione della qualità e della sicurezza si fonda sulle norme DIN EN ISO 9001:2008 e DIN EN ISO 13485:2003+AC:2007; i nostri letti recano il marchio CE. 3 anni di garanzia di fabbrica. **Made in Germany**

La nostra raccomandazione: Standard "Sturzprophylaxe" (cfr. standard Sturzprophylaxe (Profilassi anticaduta) di febbraio 2005, cap. 2.6.2.7., pagg. 71/72. Informazioni sono disponibili al sito www.dnqp.de)

* Istituto federale tedesco per i farmaci e i prodotti medicali, Berlino
** cfr. standard degli esperti di profilassi anticaduta del febbraio 2005, Cap. 2.6.2.7., pag. 71/72 Per informazioni visitare il sito www.dnqp.de

protezione laterale

Innovazione

Soluzione 10

Accoglienza 1° livello: con le sponde nella posizione abbassata, il letto estetico nova assume un aspetto normale.



Protezione libera da barriere 2° livello: Le sponde laterali servono per una protezione libera da barriere e per l'orientamento del paziente.



Protezione e libertà (posizione di giorno) 3° livello: la posizione alzata della sponda laterale offre protezione senza che il paziente venga limitato nei movimenti - adattabile alla discesa sul lato sinistro o destro del letto.



Sicurezza assoluta (zero gap) con 12cm Materasso (posizione notturna) 3° livello: per un'ottima protezione in caso di utilizzo di materassi da 12 cm.








I letti estetico nova convincono grazie al loro concetto di protezione conforme alle esigenze dei pazienti e del personale di assistenza. estetico nova con protezioni laterali divise (zero gap) è conforme allo standard degli esperti per la "profilassi anticaduta". Le protezioni laterali disposte sul lato della testa supportano la mobilità del paziente e gli danno allo stesso tempo protezione. Nella posizione più alta entrambi le parti delle sponde

chiudono così bene tra loro, che risultano sicure quanto le sponde continue. In tal modo estetico nova è adatto per tutti i livelli di assistenza, nonché per l'impiego di cinture di fissaggio. Nel quarto livello estetico nova è adatto anche per l'impiego di materassi speciali con spessori di 1.8 cm. Se desiderato dal cliente il letto per lungodegenti è disponibile anche con una protezione laterale continua.

Tradizionale

Soluzione 09/06

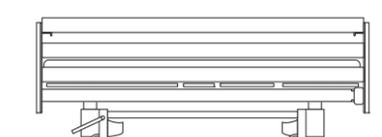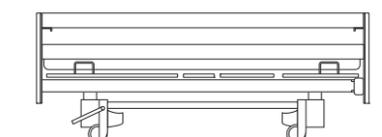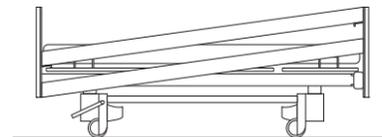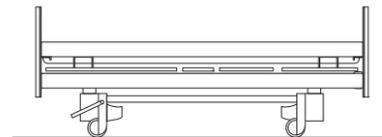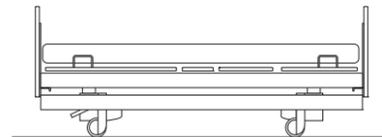

mobilità

Risparmio di tempo Grazie alla possibilità di frenata e movimentazione del letto in ogni posizione non è più necessario un posizionamento sullo zero.




Semplificazione del lavoro di assistenza Grazie alla ruota guida il letto può essere movimentato in modo agevole da una sola persona.

Freno centrale Per semplificare il lavoro del personale di assistenza estetico nova offre tre diverse regolazioni di frenatura e movimento: la posizione frenata, il movimento libero e l'elemento guida. Queste posizioni sono facilmente regolabili tramite il freno centrale benaccessibile.


Accessibilità dal lato inferiore Il telaio disposto esternamente consente di accedere comodamente dal lato inferiore del letto estetico nova con dei comuni sollevatori.

Stabilità e sollecitabilità Grazie alla stabile costruzione delle colonne di sollevamento, il letto può sopportare, anche nella posizione più elevata, un carico di massimo 200 kg. Le colonne di sollevamento di produzione propria hanno una potenza di regolazione di rispettivamente 2000 N e attualmente sono in uso in oltre 60.000 diverse strutture in tutto il mondo. Anche nella posizione poltrona le colonne di sollevamento rimangono diritte e consentono quindi una movimentazione priva di problemi. Le colonne di sollevamento essendo un sistema chiuso, non necessitano di manutenzione, sono semplici da pulire e rendono pertanto minimi i costi aziendali.

Struttura delle colonne di sollevamento unica nel suo tipo Al contrario di altri meccanismi di sollevamento, le colonne del letto estetico nova non presentano raccordi articolari o a perno, nei quali possono entrare liquidi imbrattanti o che possono complicare le operazioni di pulizia. Grazie all'ossidazione elettrolitica delle colonne di sollevamento e alla sottile pellicola di lubrificante permanente, le colonne di sollevamento offrono soltanto una minima capacità di adesione per liquidi imbrattanti. Gli imbrattamenti rimangono solo in forma leggera e possono essere eliminati facilmente dopo che si sono seccati.

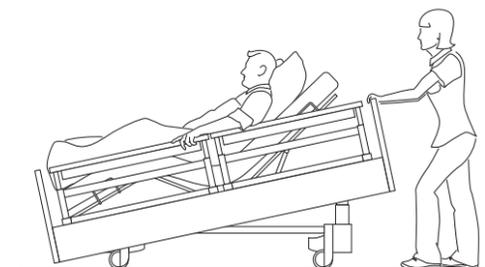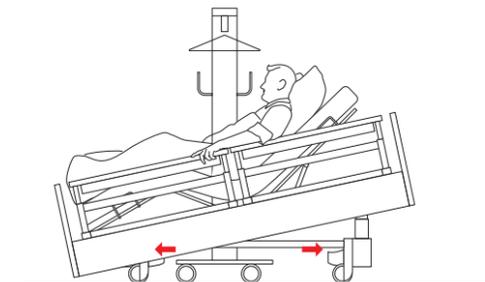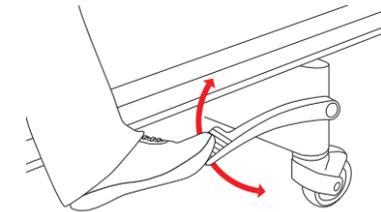

2000 N = 200 kg per ogni colonna di sollevamento



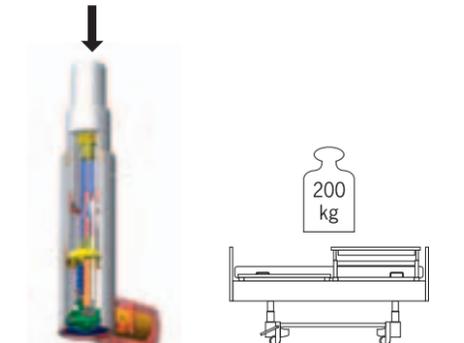


piani rete


1

Postura fisiologica

Requisito necessario per una postura fisiologica a letto è una spalliera con una lunghezza di almeno 80 cm. Vengono ridotte le forze di gravità e la respirazione viene semplificata dall'inclinazione nell'area del bacino. Inoltre la testa viene supportata in modo sicuro.

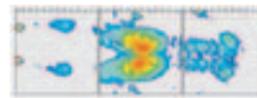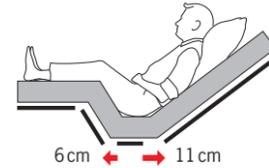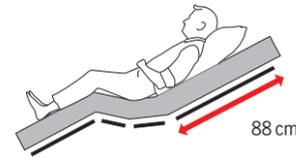

Superficie di degenza standard

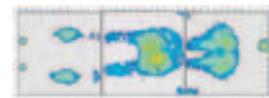

Doppia retrazione - 17 cm di spazio in più nel letto

2

Retrazione doppia

La retrazione doppia di spalliera (11 cm) e alza gambe (6 cm) serve ad alleggerire la pressione nell'area del bacino e riduce l'attrito nonché le forze di gravità. Il rischio di decubito viene ridotto. Inoltre si ottengono 17 cm in più di spazio nel letto. I pazienti con un'altezza di 180 cm non hanno bisogno di una prolunga del piano letto di per sé ingombrante.

3

Libera scelta del materasso


Il sistema consente l'utilizzo di tutti i materassi in gommapiuma e a cellule d'aria con uno spessore di 18 cm.




4

Libera scelta del piano letto

01 Aero - Il piano letto in rete metallica è adatto ad una buona traspirazione
02 Easyclean - Le applicazioni in materiale plastico sono particolarmente semplici da pulire.
02 Komfort - Il piano letto comfort con le sue ottime caratteristiche di morbido appoggio offre un'ottima profilassi antidecubito. Le singole parti del piano letto sono estraibili per facilitarne la pulizia. Gli elementi di margine ampiamente molleggiati servono da zona di orientamento nella posizione seduta e durante il sonno.

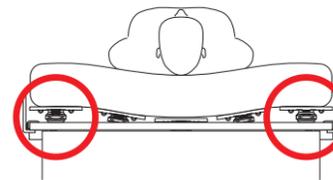

01

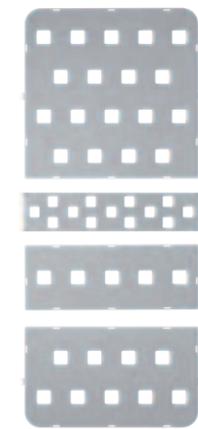

02



03

5

Preparazione integrata per la prolunga del piano letto

Con la prolunga del piano letto conforme allo standard il letto per lungodegenti può essere adattato rapidamente e facilmente anche a pazienti di statura maggiore di 180 cm. Sono a disposizione due tipi di prolunga del piano letto: una prolunga temporanea del letto (solo in caso di sponde laterali divise) ed una prolunga fissa del piano letto.



posizionamento e mobilità

Regolazione del letto per semplificare le operazioni di assistenza Nel comando manuale sono preimpostate delle funzioni automatiche semplici da utilizzare.

Descrizione generale e sicurezza L'interruttore manuale e i suoi vantaggi:

- semplice, con pochi tasti
- grazie alla preselezione risulta sicuro da primi errori – nessun rilascio della funzione a causa di inavvertita pressione di un tasto
- forma ergonomica – nessun azionamento inavvertito dei tasti
- pacchetto di sicurezza 2 in 1: interruttore manuale e scatola di bloccaggio in un'unica unità, sul retro dell'interruttore manuale
- chiave priva di magneti per la regolazione meccanica delle tre modalità dell'interruttore manuale:

01 Modalità di bloccaggio – tutte le funzioni dell'interruttore manuale sono bloccate


02 Modalità Paziente – I 3 tasti superiori sono a disposizione del paziente (in accordo alla norma DIN EN 1970 con le richieste per i portatori di handicap senza assistenza medica)

03 Modalità Assistenza – Tutti i tasti sono disponibili (in accordo alla norma DIN EN 60601-2-38 con i requisiti per persone malate con assistenza medica)

Dispositivo automatico per la seduta comfort Il presente dispositivo muove il letto nella posizione seduta preimpostata per consentire di guardare la Tv comodamente o di leggere, mangiare o condurre conversazioni guardando negli occhi l'interlocutore. Una mobilizzazione con i sollevatori diviene davvero agevole in questa posizione.

Dispositivo automatico per la profilassi Per contrastare le stasi in caso di malattie venose. Favorisce allo stesso tempo la profilassi antidecubito (posizionamento 30° mezzo Fowler). www.decubitus.de

Funzione di reset Dopo la selezione dell'elemento automatico per seduta comfort o di profilassi e conseguente movimento in discesa, tutte le regolazioni del piano letto vengono messe automaticamente nella posizione zero.

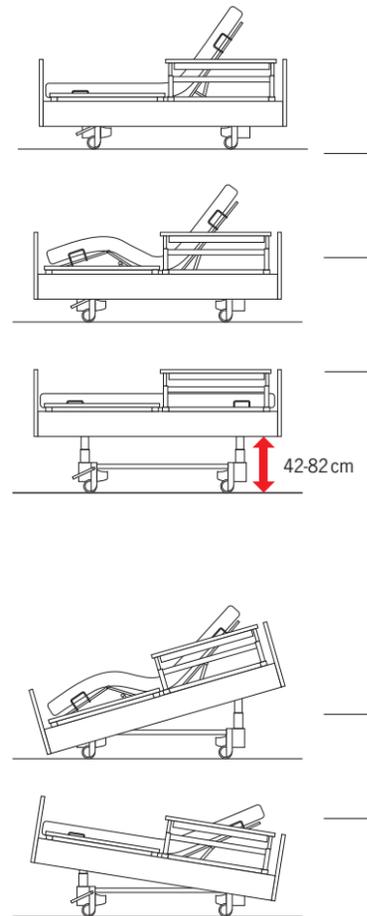

comodini e tavolini servitori





I comodini **stylo, vivo e vt1** completano il letto estetica nova dando forma ad un'unità accogliente con profili stondati ed un elegante e moderno design. Allo stesso tempo i comodini offrono molto spazio per riporre oggetti ed un comfort individuale in molte situazioni quotidiane, dal pasto alla lettura. Grazie all'impiego di cassetti invece di sportelli, l'accesso dal letto viene semplificato e viene quindi favorita la profilassi. Inoltre il personale di assistenza può usufruire del semplice uso dei comodini.

I comodini **vivo e stylo** sono disponibili anche con tavolino estraibile integrato. Il **vt1** è dotato di un piano estraibile integrato.

Il moderno tavolino estraibile non sorprende soltanto per il suo design già premiato due volte, ma anche per la sua particolare praticità. Infatti il personale di assistenza può sia estrarre il piano che regolare l'altezza con una sola mano, senza dover prima sistemare il tavolino. Un ulteriore vantaggio: il paziente può sistemare il tavolino nella giusta posizione comodamente dal letto.


Particolarmente economico è la combinazione dei comodini **vivo E 2, stylo C2 e vt 1** con il tavolino servitore **stylo S 3**, dal momento che entrambi i prodotti possono essere utilizzati indipendentemente tra loro in stanze diverse. Se il tavolino servitore non viene utilizzato, può essere riposto dietro al comodino in modo tale da risultare sempre bloccato.

Grazie al telaio a forma di U il tavolino servitore può essere utilizzato in combinazione a sistemi di trasporto, a poltrona e a sedie a rotelle. Oltre a ciò può essere utilizzato come tavolo.

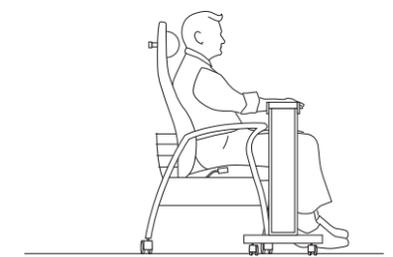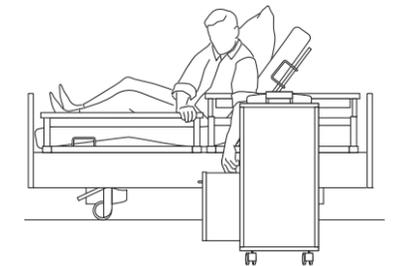


panoramica dei prodotti


Protezioni laterali

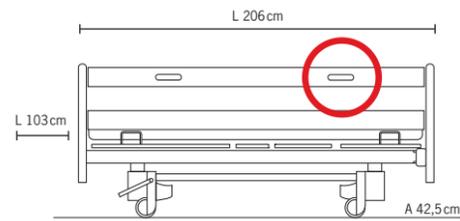


06 (soluzione con maniglia ad incavo) sponda laterale continua a 2 elementi con abbassamento centrale lungh. 206 cm, largh. 103 cm, altezza 42,5 cm (fino al piano letto)

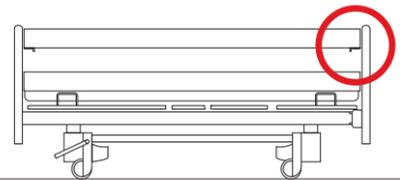

09 (soluzione con fermo di bloccaggio) sponda laterale continua a 2 elementi con abbassamento esterno lungh. 206 cm, largh. 103 cm, altezza 42,5 cm (fino al piano letto)

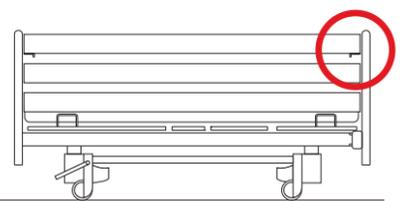


09 (soluzione con fermo di bloccaggio) sponda laterale continua a 3 elementi con abbassamento esterno lungh. 206 cm, largh. 103 cm, altezza 42,5 cm (fino al piano letto)

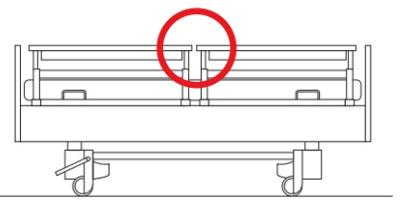


10 sponda laterale divisa "zero gap", continua lungh. 206 cm, largh. 106 cm, altezza 42,5 cm (fino al piano letto)


Testate e pediere

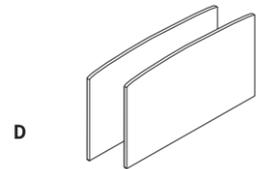


D

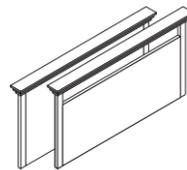


T

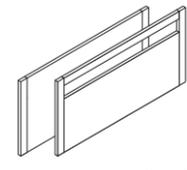


G

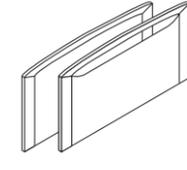


K

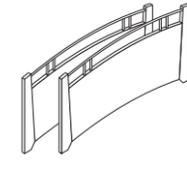


S

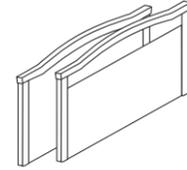

W

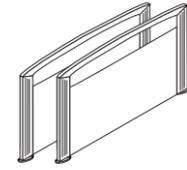


A

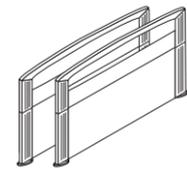


A-k

Ruote

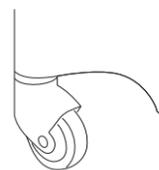


Ruote Tente Decora
Diametro 100 mm

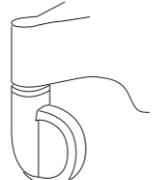


Ruote Tente Integral
Diametro 125 mm


Sistemi di piano letto

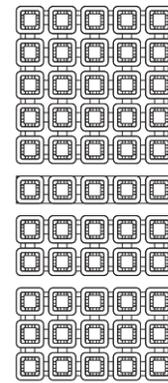

Comfort

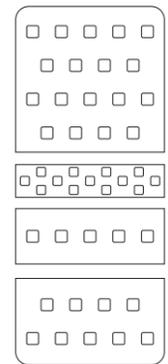


Easyclean

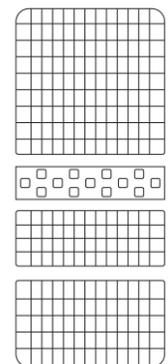


Aero


Comodini e tavolini servitori

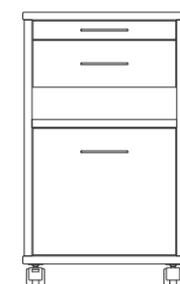


10-0368 comodino vt 1

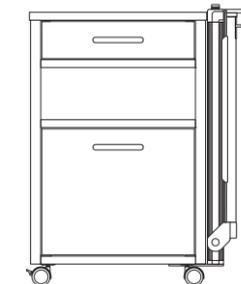


10-0283 comodino vivo E 3
con tavolino da letto estraibile integrato
10-0324 comodino vivo E 2
senza tavolino estraibile integrato
(figura in alto)

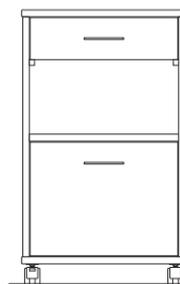


10-0330 comodino vt 2
10-0498 comodino vt 2K
con preparazione per frigorifero
(figura in alto)

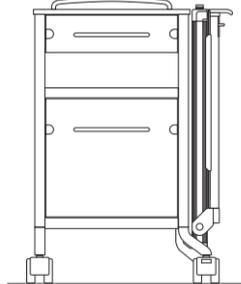

10-0271 comodino stylo C 3
con tavolino da letto estraibile integrato
10-0327 comodino stylo C 3K
con tavolino da letto estraibile integrato
nonchè frigorifero (figura in alto)
10-0193 comodino stylo C 2
10-0298 comodino stylo C 2K
con frigorifero integrato (figura in alto)

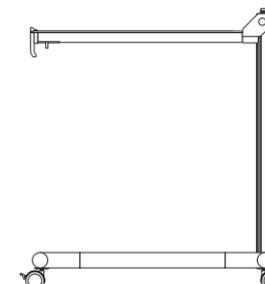


10-0273 tavolino servitore stylo S 3
con tavolino da letto abbassabile per
la combinazione con comodini senza
meccanismo di tavolino integrato

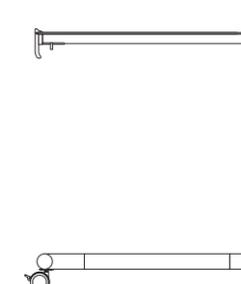

10-0400 tavolino servitore stylo S 3T
con tavolino da letto abbassabile
con ulteriore piano di appoggio

Optionals / Accessori

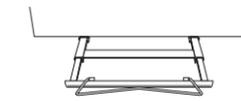


Porta coperte estraibile




Ruote respingenti




Prolunga letto tipo A
sponde laterali del tipo 10

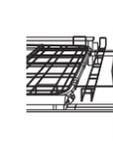


Prolunga letto tipo B
sponde laterali del tipo 10

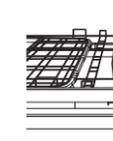


Prolunga letto tipo B
sponde laterali del tipo 06/09

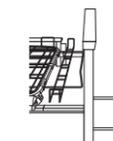


**10-0473 Respingente
parete sul lato testata**

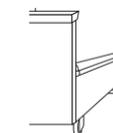

**10-0475 Respingente
parete laterale**

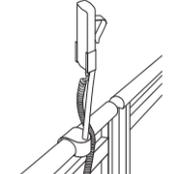

10-0419 Adattatore
Interruttore manuale per sponde
laterali del tipo 10 **divise** (zero gap)
10-0421 Interruttore manuale, corto

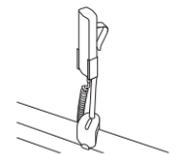

**10-0422 Supporto per accessori
interruttore manuale** Montaggio
alla sponda laterale in caso di
protezioni laterali **divise**
10-0421 Interruttore manuale, corto



**10-0424 Supporto per accessori
interruttore manuale** per Montaggio
alla sponda laterale in caso di protezioni
laterali **divise**
50-0165 Cestino per il contenitore delle urine
50-0164 Contenitore delle urine (fig. in alto)

rivestimenti

Progettazione e realizzazione
sieger design

Fotografia
Studio Casa & René Schwerdtel


Stampa
msp druck und medien

Edizione
04/2010, Rev.3, Art.-Nr.: 97-0465
wissner-bosserhoff

Sono possibili minime divergenze di colore
Con riserva di modifiche tecniche.



Alcuni dei rivestimenti raffigurati richiedono un prezzo aggiuntivo.

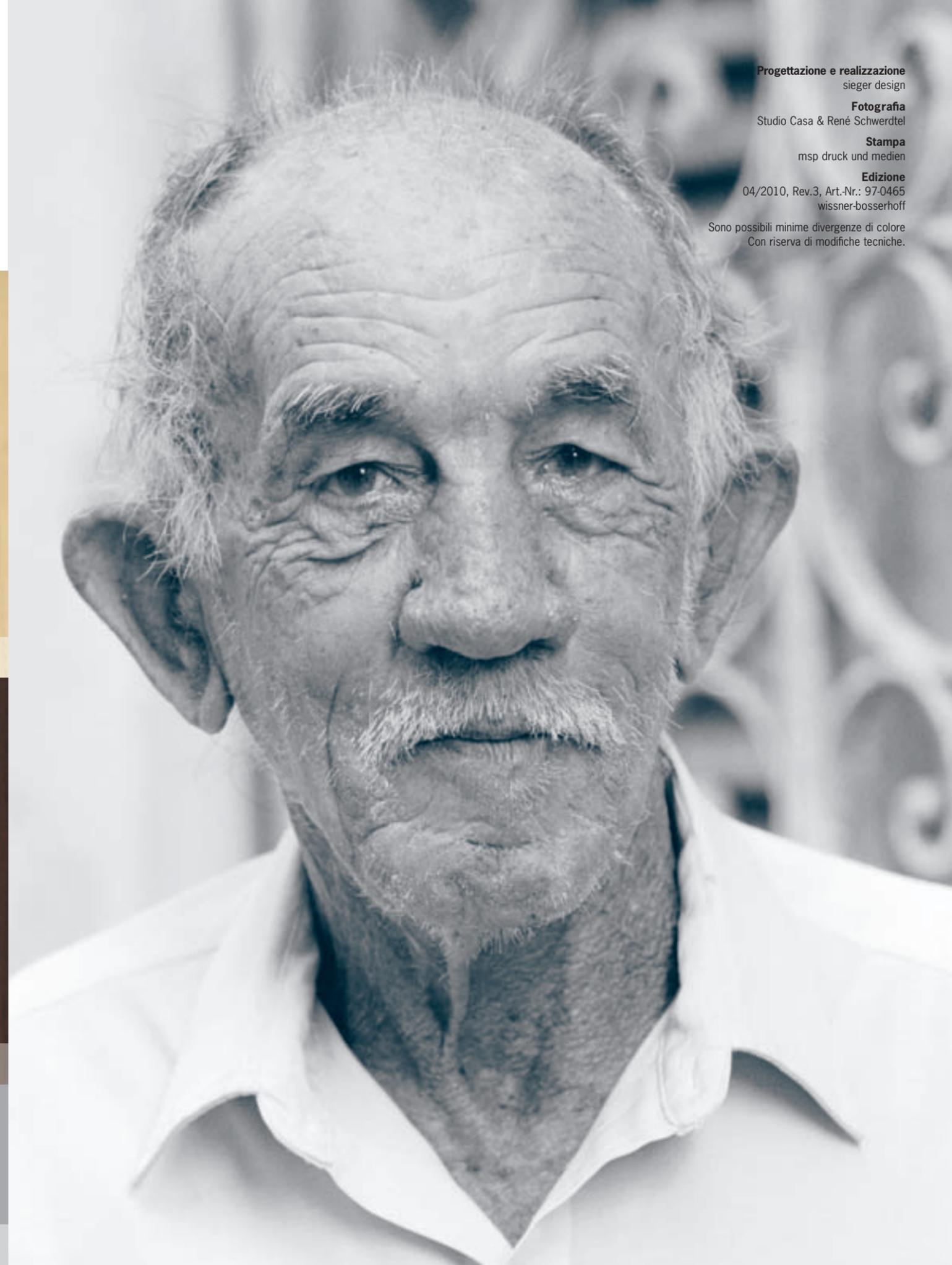



wissner- bosserhoff

Arredi per un ambiente piacevole da vivere

wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Telefono: +49 (0) 23 77 / 784-0
Telefax: +49 (0) 23 77 / 784-163
E-Mail: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de

Made in Germany

