

Sicuri e Serenity a casa propria



Ausili assorbenti & igiene (consigli e soluzioni)

SERENITY

Ne  **lab**

I nostri punti vendita

Sede principale
NL NEOLAB SA
Via Résiga 1
6883 Novazzano

Tel 091 683 03 51



Orario apertura
dal Lunedì al Venerdì
08:00 - 17:00

Punto vendita luganese
FARMACIA DEL PARCO
Via C. Cattaneo 11
6900 Lugano
Tel 091 922 80 30



Orario apertura
dal Lunedì al Venerdì
08:00 - 18:30
Sabato
08:30 - 12:30

Punto vendita Locarnese
FARMACIA SCIOLLI
Via S. Gottardo 62
6648 Minusio
Tel 091 730 15 25



Orario apertura
dal Lunedì al Venerdì
08:15 - 12:00
14:15 - 18:30

Punto vendita bellinzonese
INCLUSIONE ANDICAP TICINO
Via Linoleum 7
6512 Giubiasco
Tel 091 850 90 90



Orario apertura
da lunedì al giovedì
08:30 - 12:00
13:30 - 17:30
venerdì
08:30-12:00
13:30-16:00

Incontinenza

Presa di coscienza

L' incontinenza è vista ancora oggi come una normale conseguenza dell'età avanzata o legata a patologie che la possono causare (demenza, diabete, obesità, Parkinson, Alzheimer, conseguenze post parto. ecc.)

Purtroppo però non colpisce principalmente le persone anziane, ma può presentarsi in giovane età, soprattutto nelle donne data anche la loro conformazione fisica.

Una volta che il problema incontinenza è stato riscontrato dalla persona stessa e segnalato ai famigliari e/o al personale di assistenza; sarà il medico di famiglia che sulla base delle informazioni ricevute, ne definirà tipologia, gravità ed eventuali terapie e prescriverà gli ausili assorbenti.

IMPORTANTE

Il trattamento dell'incontinenza nella sua modalità più adeguata, dovrà tenere conto anche delle abitudini e stili di vita della persona, **nel pieno rispetto della sua dignità e intimità**, oltre a porre in essere strategie per contrastarne l'aggravamento mantenendo le capacità residue.



Interventi e misure

Quando ci viene rilasciato il certificato medico, dopo nostra richiesta al medico di famiglia che attesti il grado di incontinenza e prescriva l'uso quotidiano di ausili assorbenti, risulta fondamentale l'approccio iniziale rivolto a determinare:

A: tipologia degli ausili da utilizzare

(in relazione alla fascia di appartenenza della cassa malati)

B: taglia / misura

(indispensabile per il corretto funzionamento dell'ausilio)

Solo ed unicamente rivolgendosi al personale professionale degli aiuti domiciliari, possiamo avere la certezza di una soluzione ottimale, volta a garantire al paziente un tenore di vita qualitativamente più che accettabile ed in molti casi (incontinenza leggera) pressoché immutato.

NL Neolab SA collabora da molti anni con i servizi di cura e assistenza a domicilio del Cantone, assicurando un competente servizio proprio a tutte quelle persone bisognose di ausili, con consegne giornaliere a circa 800 pazienti in tutto il Ticino.

Dall'inizio del 2020, oltre all'abituale servizio al domicilio possiamo inoltre garantire



una consulenza da parte della nostra infermiera che sempre a supporto del personale degli aiuti domiciliari può intervenire in tutti i casi richiesti per consigliare con competenza e professionalità.


Servizi consigliati

"Facendo tesoro di questi anni di esperienza sul territorio e avvalendoci di ausili di qualità certificata dal gruppo internazionale ""OntexGlobal"" a marchio **SERENITY** possiamo garantire un servizio impeccabile sotto tutti i punti di vista, con un sensibile risparmio economico.

I nostri servizi possono essere così riassunti:

Valutazione degli ausili necessari in base al Certificato Medico

- Campionatura ausili prescelti
- Disbrigo pratiche burocratiche (richiesta diretta al medico per il certificato)
- Fatturazione diretta alle casse malati
- Consegna AL DOMICILIO Ticino e Moesano
- Prezzi ancora più' vantaggiosi concordati direttamente con alcune importanti Casse Malati (Helsana/Kpt /Sanitas /CSS)
- Controllo economico periodico, per non sfiorare il budget annuo a carico della Cassa Malati (solo su richiesta)

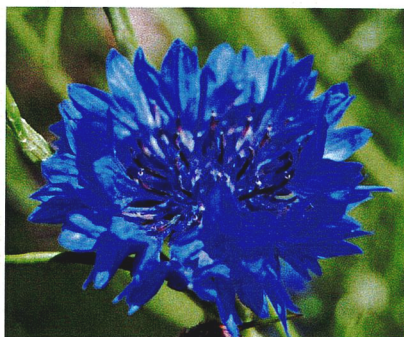

Gamma ausili assorbenti

Serenity offre prodotti adatti ad ogni tipologia di incontinenza, da leggera a severa, accessori e prodotti per l'igiene e la cura della persona.

		TABELLA PRODOTTI		
		INCONTINENZA LEGGERA	INCONTINENZA MODERATA	INCONTINENZA GRAVE
Deambulante 		<i>light</i> *  <i>light MAN</i> *  <i>light UNISEX</i> * 	Pull Up  Sagomato 	Pull Up  Sagomato 
Deambulante assistito 		<i>light</i> *  <i>light MAN</i> *  <i>light UNISEX</i> * 	Veste  Pull Up  Sagomato  Rettangolare 	Veste  Pull Up  Sagomato** 
Seduto assistito o allettato assistito  			Pann. Mutandina  Sagomato**  Rettangolare  Traversa 	Pann. Mutandina  Sagomato**  Traversa 

* con pratica striscia adesiva; utilizzabile con la propria biancheria
 ** da utilizzare con l'apposita mutandina a rete





IMPORTANTE

Conservazione e corretto uso degli ausili assorbenti

- Collocare in luogo asciutto a temperatura ambiente.
- Predisporre fuori dal sacchetto gli ausili **almeno 12 ore prima dell'utilizzo**, in maniera di garantire il 100% della performance.
- Prima dell'utilizzo **NON scuotere o sbattere l'ausilio**, ma prepararlo con cura, predisponendolo secondo la conformazione prevista (piegarlo nel senso della lunghezza conferendogli una forma a conca)
- Cambiare l'ausilio nei tempi e modi appropriati.

Il momento del cambio è facilmente identificabile. Grazie alla presenza di segnalatori esterni di umidità; quando l'inchiostro blu della scritta esterna degrada, significa che il prodotto è da sostituire.



RICHIESTA DATI PER INCONTINENZA

Gentili Clienti,

Vi richiediamo i seguenti dati per poter fatturare direttamente alla Cassa Malati i mezzi per l'incontinenza, in quanto senza gli stessi saremmo costretti a fatturare al cliente privato.

NOME:

COGNOME:

INDIRIZZO:

LOCALITÀ:

TELEFONO:

DATA DI NASCITA:

MEDICO CURANTE:

NOME CASSA MALATI BASE:

NR ASSICURATO:

NR AVS:

Inviare il questionario completato a:

NL NEOLAB SA, via Résiga 1, 6883 Novazzano

Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci al 091 683 03 51 o via email
info@neolab.ch

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Cordiali saluti.

NL NEOLAB SA

Neolab



Ausili
maggiori

Ausili
minori

Montascale
&
Rampe

Arredo
domestico

Incontinenza
&
Igiene

Arredi scolastici
&
Contract



...da oltre 30 anni radicati sul territorio!

NL NEOLAB SA

Via Résiga 1 • CH-6883 Novazzano • Tel. 091 683 03 51 • www.neolab.ch

Il sole e la farfalla



**Finalmente un raggio di sole
Ti sorprende con una carezza,**

**Sulle fragili ali della tua
Passata giovinezza.**

dedicata agli operatori e ai famigliari che assistono i loro cari