

STAMPELLE ASCELLARI

Stampelle in acciaio Inox, regolabili in altezza disponibili in tre misure.
Portata peso massimo 100 kg



Nr articolo		GIMA27792
Taglia	Piccole	
Altezza regolabile da	95 - 115	cm

Nr articolo		GIMA27798
Taglia	Medie	
Altezza regolabile da	112 - 132	cm

Nr articolo		GIMA27799
Taglia	Grandi	
Altezza regolabile da	119 - 139	cm

REGOLAZIONE STAMPELLE ASCELLARI

La corretta misurazione delle stampelle ascellari prevede di regolare la lunghezza in modo che il cuscinetto ascellare sia a circa 2,5-5 cm sotto l'ascella. L'impugnatura deve essere all'altezza del gran trocantere femorale (la sporgenza ossea dell'anca) in modo che il gomito sia leggermente flesso (circa 15-30°).

Passaggi per la misurazione e la regolazione:

1. Regolazione dell'altezza della stampella:

- Chiedi alla persona di rimanere in posizione eretta.
- Allinea il cuscinetto ascellare della stampella a circa **2,5-5 cm sotto l'ascella**.
- Regola la lunghezza della stampella sfilando e bloccando la canna nei fori predisposti.
- Assicurati che il perno o la vite di regolazione sia saldamente fissato.

2. Regolazione dell'impugnatura:

- Posiziona l'impugnatura della stampella all'altezza del **gran trocantere femorale**, la sporgenza ossea dell'anca.
- La persona dovrebbe avere il gomito leggermente flesso, con un'angolazione di circa 15-30°.

3. Regolazione della seconda stampella:

- Una volta che la prima stampella è stata regolata correttamente, regola la seconda stampella in modo che la sua lunghezza e l'altezza dell'impugnatura corrispondano alle impostazioni della prima.

4. Verifica finale:

- Fai una prova per assicurarti che le regolazioni siano corrette e che la persona si senta a suo agio e stabile.

Altezza Ideale del Paziente per Codice

Codice Prodotto	Altezza Regolabile Stampella	Altezza Ideale del Paziente	Classificazione Taglia
27792	95 - 115 cm	Circa 137 - 157 cm	Piccola / Bambino (Junior)
27798	112 - 132 cm	Circa 157 - 178 cm	Media (Medium)
27799	119 - 139 cm	Circa 178 - 198 cm	Grande (Large)

Regolazione altezza:

premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desiderato.

Regolazione distanza tra l'appoggio ascellare e l'impugnatura:

svitare il dado a farfalla e sfilare la vite

dall'impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.

<https://www.youtube.com/watch?v=ubKyqkmWzHQ>

Link spiegazione.

