



Operator

KIT AUSILI PER OPERATORI ASSISTENZA DOMICILIARE

Contenuto della borsa - zaino

- N. 1 dispositivo per sollevamento “easy-up”
- N. 1 cintura di trasferimento ergonomica
- N. 1 disco girevole di trasferimento antiscivolo
- N. 1 telino ad alto scorrimento per riposizionamento

Uso

Riservato a operatori professionali.

Se utilizzati correttamente, questi ausili sono un valido aiuto per la piccola mobilizzazione e trasferimento di pazienti con sufficienti capacità motorie, riducendo notevolmente il dispendio di energie e possibili traumi o cadute

Foto degli ausili

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Listino prezzi

Foto 1	Easy up	CHF	65.00
Foto 2	Cintura	CHF	90.00
Foto 3	Disco girevole	CHF	80.00
Foto 4	Telino 70 x 100 cm	CHF	62.00
Kit completo "Operator"		CHF	290.00

Prezzi IVA esclusa – Franco Novazzano

Istruzioni di lavaggio

Easy up (foto 1)	Non lavare in lavatrice né lavare a mano per evitare di danneggiare i materiali. Disinfettabile con un panno morbido con un detergente a bassa percentuale di alcol - non utilizzare candeggina o altri detersivi aggressivi.
Cintura di trasferimento del busto (foto 2)	Non lavare in lavatrice per evitare di danneggiare i materiali, lavare a mano a 30°C con detersivi delicati.
Disco (foto 3)	Non lavare in lavatrice né lavare a mano per evitare di danneggiare i materiali. Pulire con panno umido e con un detergente non aggressivo – non utilizzare candeggina o altri detersivi aggressivi.
Telino di scorrimento (foto 4)	Lavare in lavatrice utilizzando un detergente idoneo. Pulire strofinando la superficie con un panno morbido/una spugna non abrasivo imbevuto in acqua ed utilizzare sapone neutro o un detergente idoneo non aggressivo.



Conservare e trasportare gli articoli sopracitati in un ambiente asciutto a temperatura ambiente.

Novazzano 09/2024